

**Warnhinweis:**

DENTA BONDING (LIGHT CURE ADHESIVES ORTHO-BONDING) Primer und Kleber enthalten Acrylat Monomere. Acrylat Monomere sind bekannt dafür bei bestimmten empfindlichen Personen allergische Reaktionen auf der Haut zu verursachen. Sie können auch zu Haut- und Augenreizungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt. Tragen Sie Handschuhe während der Nutzung dieser Materialien.

Erste Hilfe:

Augenkontakt: Sofort mit reichlich Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung suchen Sie einen Arzt auf.

Hautkontakt: Waschen Sie die betroffene Stelle mit Seife und Wasser. Bei anhaltender Reizung suchen Sie einen Arzt auf.

Vorsorge: Bitte befolgen Sie den Anweisungen des Herstellers zur Handhabung, richtigen Nutzung und Empfehlungen zum Augenschutz, wenn Sie die Lichthärtung verwenden.

Hinweise zum Gebrauch:**A: Zahnvorbereitung:**

1. Zahn mit einer öl-freien Paste oder Bimsstein vorbehandeln. Mit Wasser spülen.
2. Zahn isolieren.
3. Gründlich lufttrocknen unter Einsatz von öl- und feuchtigkeitsfreier Luftquelle.

B: Ätzen:

Tragen Sie DENTA BONDING Ätzgel auf die Zahnoberfläche auf, unter der mitgelieferten Anleitung. Falls Sie anderes Ätzgel verwenden, folgen Sie der Produkthanleitung dieses Herstellers für die richtige Technik/Anwendung und empfohlene Ätz-Zeit.

C: Grundieren:

1. Zahn gründlich lufttrocknen.
2. Tragen Sie eine kleine Menge DENTA BONDING Primer gut auf.
3. Verwenden Sie eine dünne gleichmäßige Schicht Primer für jede Zahnoberfläche um zu kleben

Hinweis: Da DENTA BONDING Primer ein Benetzungsmittel ist, ist nur eine dünne Schicht notwendig.

D: Kleben:

Tragen Sie mit der Spritze eine kleine Menge vom DENTA BONDING Kleber auf jede Bracket Basis auf. Sparsam einsetzen. **Wenn Sie fertig sind, wischen Sie die Spritzenspitze sauber und verschließen mit der Kappe.**

E: Platzierung und Härten:

1. Sofort nach dem Auftragen des Klebers, platzieren Sie das Bracket leicht auf die Zahn-oberfläche.
2. Richten Sie das Bracket zur Endposition aus, drücken Sie kräftig um das Bracket zu platzieren.
3. Entfernen Sie vorsichtig Kleberreste um das Bracket herum, ohne es zu deplatzen.
4. Halten Sie das Lichthärtegerät bei einer Entfernung von 2-3 mm für 10 Sekunden bei jedem Bracket (je linke und rechte Seite).

F: Lagerung und Nutzung:

1. Setzen Sie die Materialien nicht erhöhten Temperaturen oder intensivem Licht aus. Vor Nutzung an Raumtemperatur anpassen lassen.
2. Lagern Sie die Materialien nicht in der Nähe von Eugenol-enthaltenden Produkten, da dies die Aushärtung des Klebers beeinträchtigen kann.
3. Nutzung bei Raumtemperatur (20-25 °C), Lagerung 2-27 °C, Lichtempfindlich.
4. Haltbarkeitsdauer bei Raumtemperatur ist das jeweils angegebene Ablaufdatum (Box, einzelne Produkte). Rotieren Sie den Lagerbestand, um die Haltbarkeit zu optimieren.