

Gebrauchsanweisung

- wahlweise im Unter- oder Oberkiefer tragbar
- den integrierten Metallbogen durch leichtes Biegen an die Zahnbogenform anpassen – die Wasserkissen sollten passiv u. symmetrisch zwischen beiden Zahnreihen liegen
- die V-Markierung zeigt die Mitte des Verbindungsschlauches der beiden Wasserkissen und sollte beim Anpassen und Tragen nahe der Zahnmittellinie im Ober- bzw. Unterkiefer liegen
- **AquaSplint[®]mini** bitte sofort nach dem Herausnehmen mit Wasser abspülen und in die Aufbewahrungsdose legen

Instruction

- Can be worn in the lower or upper jaw
- The integrated wire should be bend easily according to the dental arch – both water pads should remain passively and symmetrically between the teeth
- The V-mark shows the midpoint of the connection tube of both water pads. It should be rested/located near the midline of the upper or lower jaw
- Please wash up the **AquaSplint[®]mini** with water after removal and place it into the hygiene box

