

# Gebrauchsanweisung



AquaSplint®**thermo** für **2-3 Minuten** mit einer Pinzette in **80°C heißes Wasser** eintauchen, bis der Kunststoff transparent wird. Danach **10 Sekunden** in **kaltem Wasser** abkühlen lassen.



AquaSplint®**thermo** im Unterkiefer einsetzen, leicht darauf beißen und **ca. 5 Minuten abkühlen/aushärten** lassen.



Zur Beschleunigung der Abkühlung mit kaltem Wasser nachspülen (Wasser kann geschluckt werden).



AquaSplint®**thermo** nach dem **Aushärten** herausnehmen. Bei unerwünschtem Ergebnis kann der Vorgang wiederholt werden.

**Empfohlene Tragedauer max. 4 Wochen.**

**Wir empfehlen die Anwendung durch Fachpersonal!**